



## [MIELE G 7781 // G7781 THERMODESINFEKOR](#)

**SKU:** AF092014

zzgl. [Versandkosten](#)

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Dental und Zahnheilkunde](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Thermodesinfektor

Hersteller : MIELE

Typ. G 7781 / 1

3N AC 400V 9;7Kw 16A

Serien Nr. 12/18356747

Inkl 02 Körben

Normal

0

21



false  
false  
false

DE  
X-NONE  
X-NONE

```
/* Style Definitions */  
table.MsoNormalTable  
{mso-style-name:"Normale Tabelle";  
mso-tstyle-rowband-size:0;  
mso-tstyle-colband-size:0;  
mso-style-noshow:yes;  
mso-style-priority:99;  
mso-style-parent:"";  
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;  
mso-para-margin-top:0cm;  
mso-para-margin-right:0cm;  
mso-para-margin-bottom:10.0pt;  
mso-para-margin-left:0cm;  
line-height:115%;  
mso-pagination:widow-orphan;  
font-size:11.0pt;  
font-family:"Calibri", "sans-serif";  
mso-ascii-font-family:Calibri;  
mso-ascii-theme-font:minor-latin;  
mso-hansi-font-family:Calibri;  
mso-hansi-theme-font:minor-latin;  
mso-fareast-language:EN-US;}
```

Der Reinigungs- und Desinfektionsautomat G 7781 TD von Miele ist ein professionelles Frontladegerät um zahnmedizinische Instrumente, Gerätschaften und Hilfsteile zu reinigen und zu desinfizieren. Folgende 3 Programmen sind eingestellt und wählbar :

- Programm Desin 93c/10 Min. mit bakterizider und viruzider Wirkung einschliesslich HBV und HIV gem. Paragraph 10C BSeuchG mit 2x Zwischenspülen und Nachspülen bei 65c 3 Min.
- Programm DESN vario TD: Vorspülen und Reinigen bei 60c 5min.;2x Zwischenspülen; Desinfizieren/Nachspülen bei 93c /5 Min.
- Programm Intensiv: Vorspülen, Reinigen bei 65c/ 3 Min.; Zwischenspülen; Nachspülen bei 65c /2 Min.



Die Gerätevorteile des Miele Thermodesinfektors sind :

- Standardisiertes, validierbares Dekontaminationsverfahren in dem die Reinigung und Desinfektion von kontaminierten Instrumenten, Gebrauchsgegenstände und Hilfsutensilien in einem geschlossenen System stattfindet
- Thermische Desinfektion mit nachgewiesener fungizider, bakterizider und virusinaktivierender Wirkung
- Gründliche Innen- und Außenreinigung der Instrumente
- Sichere und schonende Aufbereitung der hochwertigen Instrumente
- Hoher und gleich bleibender Hygienestandard bei der Instrumentenaufbereitung
- Reduzierung der Kontaminationsgefahr
- Minimierung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten
- Einfache Trockenlagerung bis zu 6 Std. im Thermo-Desinfektor
- Effizienter Personaleinsatz
- Geringe Kosten

### **Ausstattung:**

Spülraum/Edelstahl für 2-Etagennutzung;  
Spülarme/Edelstahl;  
4fach Filtersystem;  
UP Umwälzpumpe Qmax. 400 l/min;  
AP Ablaufpumpe;  
DK Dampfkondensator/Wärmetauscher;  
WES Wasserenthärter;

### **Beheizung**

Elektro

### **Dosiertechnik**



1 Dosiergerät/Tür für Pulverreiniger; (Reiniger)  
1 Dosiergerät/Tür für fl. Medien; (Klarspüler)  
1 Dosierpumpe 10/30 für fl. saure Medien; (Neutralisator)  
Anschluss für DOS-Modul: DOS C 60 Dosiergerät für fl. Reiniger (*DOS Modul C60, dieses kann optional im Handel erworben werden*)

## **Spültechnik**

Frischwassersystem;  
thermische Desinfektion bei 93°C mit  
10/5 Minuten Haltezeit;  
Ankupplungssystem für Oberkörbe und  
Oberkörbe/Injektor

## **Bauform**

Frontladegerät mit Klapptür;  
Standgerät/unterbaufähig;  
schräge Schalterblende;  
H 820, B 600, T 600 mm

Differenzbesteuerter Ware nach §25a USTG. - **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)



Mobile. 0049 176 205 800 86  
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03  
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256  
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

