



[MIELE G 7781 // G7781 THERMODESINFEKOR](#)

SKU: AF092014

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort: Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Dental und Zahnheilkunde](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Thermodesinfektor

Hersteller : MIELE

Typ. G 7781 / 1

3N AC 400V 9;7Kw 16A

Serien Nr. 12/18356747

Inkl 02 Körben

Normal

0

21

false



false

false

DE

X-NONE

X-NONE

/ Style Definitions */*

table.MsoNormalTable

{mso-style-name:"Normale Tabelle";

mso-tstyle-rowband-size:0;

mso-tstyle-colband-size:0;

mso-style-noshow:yes;

mso-style-priority:99;

mso-style-parent:"";

mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;

mso-para-margin-top:0cm;

mso-para-margin-right:0cm;

mso-para-margin-bottom:10.0pt;

mso-para-margin-left:0cm;

line-height:115%;

mso-pagination:widow-orphan;

font-size:11.0pt;

font-family:"Calibri","sans-serif";

mso-ascii-font-family:Calibri;

mso-ascii-theme-font:minor-latin;

mso-hansi-font-family:Calibri;

mso-hansi-theme-font:minor-latin;

mso-fareast-language:EN-US;}

Der Reinigungs- und Desinfektionsautomat G 7781 TD von Miele ist ein professionelles Frontladegerät um zahnmedizinische Instrumente, Gerätschaften und Hilfsteile zu reinigen und zu desinfizieren. Folgende 3 Programmen sind eingestellt und wählbar :

- Programm Desin 93c/10 Min. mit bakterizider und viruzider Wirkung einschliesslich HBV und HIV gem. Paragraph 10C BSeuchG mit 2x Zwischenspülen und Nachspülen bei 65c 3 Min.
- Programm DESN vario TD: Vorspülen und Reinigen bei 60c 5min.;2x Zwischenspülen; Desinfizieren/Nachspülen bei 93c /5 Min.
- Programm Intensiv: Vorspülen, Reinigen bei 65c/ 3 Min.; Zwischenspülen; Nachspülen bei 65c /2 Min.

Die Gerätevorteile des Miele Thermodesinfektors sind :



- Standardisiertes, validierbares Dekontaminationsverfahren in dem die Reinigung und Desinfektion von kontaminierten Instrumenten, Gebrauchsgegenstände und Hilfsutensilien in einem geschlossenen System stattfindet
- Thermische Desinfektion mit nachgewiesener fungizider, bakterizider und virusinaktivierender Wirkung
- Gründliche Innen- und Außenreinigung der Instrumente
- Sichere und schonende Aufbereitung der hochwertigen Instrumente
- Hoher und gleich bleibender Hygienestandard bei der Instrumentenaufbereitung
- Reduzierung der Kontaminationsgefahr
- Minimierung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten
- Einfache Trockenlagerung bis zu 6 Std. im Thermo-Desinfektor
- Effizienter Personaleinsatz
- Geringe Kosten

Ausstattung:

Spülraum/Edelstahl für 2-Etagennutzung;
Spülarme/Edelstahl;
4fach Filtersystem;
UP Umwälzpumpe Qmax. 400 l/min;
AP Ablaufpumpe;
DK Dampfkondensator/Wärmetauscher;
WES Wasserenthärter;

Beheizung

Elektro

Dosiertechnik



1 Dosiergerät/Tür für Pulverreiniger; (Reiniger)
1 Dosiergerät/Tür für fl. Medien; (Klarspüler)
1 Dosierpumpe 10/30 für fl. saure Medien; (Neutralisator)
Anschluss für DOS-Modul: DOS C 60 Dosiergerät für fl. Reiniger (*DOS Modul C60, dieses kann optional im Handel erworben werden*)

Spültechnik

Frischwassersystem;
thermische Desinfektion bei 93°C mit
10/5 Minuten Haltezeit;
Ankupplungssystem für Oberkörbe und
Oberkörbe/Injektor

Bauform

Frontladegerät mit Klapptür;
Standgerät/unterbaufähig;
schräge Schalterblende;
H 820, B 600, T 600 mm

Differenzbesteuerter Ware nach §25a USTG. - **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03



Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

